

Reflets

LA CHAUSSETTE



GIBAUD

NPR13012
V3_202210

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si le moindre problème survient lors de l'application de ce dispositif, contactez votre médecin. En cas de réclamation, merci de renvoyer le produit dans son emballage.

AVERTISSEMENTS

Le dispositif ne doit pas être placé en contact direct avec une lésion cutanée.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de ce dispositif, par exemple une douleur ou l'apparition de symptômes locaux, retirer le dispositif et contacter votre médecin.

Ce dispositif ne doit être utilisé que sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'ÉLIMINATION DU DISPOSITIF

Lavage machine en programme délicat jusqu'à 40°C, sans adoucissant. Pas de lavage à sec ni de repassage. Séchage à plat loin d'une source de chaleur (ni radiateur ni sèche-linge).

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



INDICATIONS

CLASSE 2 : 20,1 à 27 hPa (15,1 à 20 mmHg)

Pour les affections des jambes pouvant bénéficier d'une thérapie par compression, notamment dans les cas suivants :

- Post-opératoire & Post-sclérothérapie de veines variqueuses, diamètre veineux > 3 mm (C2).
- Symptômes veineux (douleur, inconfort, crampes) liés à la grossesse.
- Situations qui perturbent l'hémodynamique veineuse (vols longs, station debout prolongée, sport).

CONTRE-INDICATIONS

Le dispositif médical ne doit pas être porté par des personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée.

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmasia cerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose/Phlébite septique.
- Neuropathies et troubles de la sensibilité périphérique.
- Insuffisance cardiaque décompensée.
- Microangiopathie diabétique évoluée.

Reflets La Chaussette classe 2 : Polyamide, Élasthanne.

www.gibaud.com



GIBAUD

Reflets
LA CHAUSSETTE

CHAUSSETTES

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE TREVOUX



Compression médicale pour la femme



GIBAUD

GIBAUD

En dehors de ces valeurs, veuillez nous consulter.

HAUTEUR TAILLE en cm 1 2 3 4 5

CHAUSSETTE du sol au pli du genou long : > 37 cm normal : < 37 cm

27 - 35 31 - 39 35 - 43 39 - 47 43 - 51
ou plus large du mollet

17,5-20,5 20,5-23 23,5-26 26,5-29 29,5-32
ou plus fin de la cheville



À METTRE DÈS LE MATIN AU LEVER MISE EN PLACE

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
Pour faciliter la mise en place, nous vous conseillons d'enfiler le produit sur une peau bien sèche.

1 et 2 - Retourner le produit sur lui-même en pinçant le talon.

3 - Enfiler le pied jusqu'au talon en veillant à ce que celui-ci soit bien en place.

4 - Dérouler régulièrement le produit le long de la jambe en l'ajustant sans tirer, par des mouvements légers de droite à gauche afin d'éviter la formation de plis.

Masser la jambe de bas en haut pour aider le textile à se mettre en place et gommer les éventuels plis.



C P C
SAINT-ETIENNE

CLIENT: GIBAUD	COULEURS UTILISEES: Cyan Magenta Yellow Black PANTONE 2347 C DECOUPE CPC	DATE: 20/10/2022
PRODUIT: CONFORT LA CHAUSSETTE		VALIDATION
REFERENCE: NPR13012_V3_202210		
INDICE:		